





**MED.ONE**

德康醫療器材事業有限公司

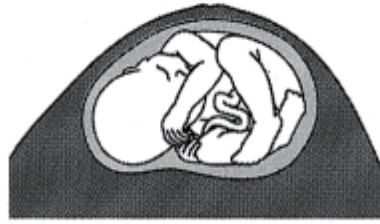

cross-section of pregnant  
overlay containing fetus

# 產科模型

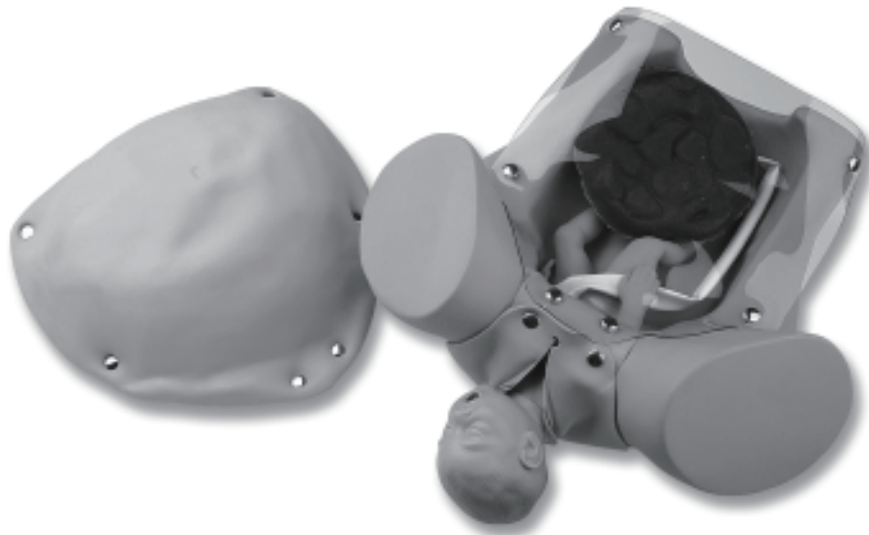

Item Number #180

## 產科模型使用說明書

此款模型有白人膚色或非裔美國人膚色兩種版本可供選擇。



特點包括解剖學正確的骨盆模型，帶有胎兒和胎盤，為您的學員提供多種技術和緊急分娩程序的真實練習機會。套件中包含一次性臍帶和夾子、額外的外陰、孕肚覆蓋物、透明腹部覆蓋物、模擬血粉以及輕便的軟質攜帶包。

孕肚覆蓋物包含一個帶有永久放置的胎兒的液囊，胎兒可以通過觸診感知。液體混合物需要在收到後通過加入水製成。我們建議通過底部的閥門向孕肚注入4（四）升水。這些水會與囊中已有的粉末狀物質混合，模擬孕肚的感覺。

一個透明的乙烯充氣袋也包括在內，需放置在孕肚覆蓋物下，通過提供的氣泵球充氣，以達到所需的肚子硬度。

充氣時，將帶有金屬螺絲閥的透明袋子放置在腔體的上側（靠近腰部），然後將孕肚覆蓋物放置在模型上。將氣泵球末端的管子連接到透明袋的閥門上，通過按壓氣泵球對透明袋充氣。當達到所需的硬度時，應關閉透明袋的閥門並取下氣泵球，以防止空氣洩漏。這將使孕肚呈現更加逼真的外觀和手感。

血粉和甲基纖維素包含在內，可用於生產可通過產道的體液。說明書中包括了混合方法。

如果您選擇不使用液體進行模擬分娩，內含的粉末可以用於撒在產道內以及胎兒外部。

建議不要在使用孕肚覆蓋物時使用人工血液，以防止胎兒和模擬羊水的尼龍塗層內囊被染色。

模型包括一次性臍帶（可以打結和剪斷）、一次性臍帶夾以及顏色逼真的類似肝臟的胎盤。套件中還包括一個新生兒模型，其肚臍處可以“卡扣”連接臍帶，臍帶的一端連接新生兒，另一端連接胎盤。





## 填充產科胎兒模型的步驟

將氣泵球的管子套在模型左腳的金屬閥門上。  
旋轉閥門以打開。  
持續按壓氣泵球，直到達到所需的硬度。  
旋緊閥門以重新密封。  
移除氣泵組件。

## 清潔與保養

所有部件都可以使用溫水和溫和的肥皂清洗。  
每次使用後清潔儲液器、新生兒模型及內部產道。  
模擬血液可以通過徹底清洗去除大部分衣物上的污漬，但可能會留下永久性污漬。  
使用前請參閱包裝上的注意事項。

## 部件編號

180	產科模型（白人膚色）帶覆蓋物及軟質攜帶包
182	骨盆（硬質）
183	產科外陰（解剖學正確）
184	產科透明覆蓋物
171	產科不透明覆蓋物
185	胎盤
186	產科模型軟質攜帶包
159	臍帶（12根）
154	防滲墊（5個裝）
162	甲基纖維素
173	胎兒模型（新生兒）
172	胎兒模型（早產兒）
167	臍帶夾
225	血粉（可製作1加侖血液）
187	氣囊



## 退貨政策

如果因任何原因需要退還商品，請聯繫我們的客戶服務部門以獲取退貨授權號碼。未經事先授權的商品將不予接受。請在電話申請退貨時提供您的發票號碼。如果需要，將向您發送運輸箱和包裝說明，以便退還商品。

## 保修

Simulaids 保證該產品在購買之日起三年內不存在任何材料和/或工藝上的缺陷，以產品發貨給終端用戶的發票日期為憑。此保修明確不包括濫用、意外或故意損壞，或對產品進行的任何形式的修改。在調查和審查實際產品及損壞情況後，Simulaids 保留自行決定修理或更換受影響部件或整個設備的權利。在大多數情況下，顯示損壞的產品數字照片將有助於產品退還工廠進行檢修。任何產品在沒有 Simulaids 發出的正確退貨授權的情況下，將不會被工廠接受。

運費和運輸費由終端用戶自行承擔。所有需要保修的產品必須提供序列號和發票號，這些信息由您購買產品的代理機構提供。如果沒有這些信息，產品將無法獲得所需的退貨授權號碼。



德康醫療  
MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司

service@theone.com.tw

02-2258-2288

220新北市板橋區合宜路199號1樓