



# 抽痰機 (7314P-D)

## 中文操作



**德康醫療**  
MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司

service@theone.com.tw

02-2258-2288

220新北市板橋區合宜路199號1樓

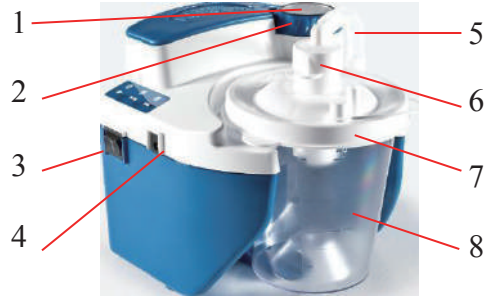
# 抽痰機 (7314P-D) 操作說明書

## ◆ 機器部位說明




1. 壓力錶
2. 抽吸力調整鈕(藍色旋鈕)
3. 電源開關
4. 直流電接頭
5. 連接短管(連接機器與抽痰瓶)
6. 過濾器—**注意：不可用水清洗。**

如過濾器被水沾濕，將造成無法抽吸(壓力錶雖上升，但無吸力)，請立即更新過濾器

7. 抽痰瓶
8. 抽痰瓶蓋



## ◆ 面板指示燈

-  綠燈亮，表示使用外部電源。
-  黃燈亮，表示內電池正在充電。
-  紅燈亮，表示內電池電力不足，需充電。充電時間大約 10-17 小時。

## ◆ 操作說明

1. 將變壓器一端插入抽痰機直流電接頭，另一端插入電源插座。或使用車上電源線，可在汽車內操作。
2. 打開電源開關。
3. 使用抽吸力調整鈕調整壓力。(順時針為增加抽吸力，逆時針為減少抽吸力)。可將抽痰瓶蓋上病人抽吸端阻塞，由壓力錶上讀取壓力。

## ◆ 更換過濾器

只要發生溢流或每滿兩個月就要更換過濾器。



將機器置於“關閉”位置。



拆下過濾器和連接短管。



安裝新的過濾器 and 連接短管。

注意 – 請勿更換過濾器上的任何其他材料。更換可能導致污染或性能降低；請只使用原廠過濾器。

注意 – 過濾器包含憎水過濾層。如果過濾介質變濕，氣流將停止。此時必須更換過濾器。請勿將過濾介質從過濾器上移除。

## 警告及注意事項:

1. 使用機器時必須有人在一旁監視，特別是孩童或身障人士使用時。
2. 本機器僅限用於抽痰用途。
3. 請將電源線遠離發熱的表面。
4. 精神不濟或睡眠時請勿使用本產品。
5. 電源開啟時請勿覆蓋本機器或變壓器。
6. 有以下情況請勿操作機器。
  - a. 電源線或插頭損壞。
  - b. 未正常運轉。
  - c. 機器曾摔落或損毀。
  - d. 機器掉落水中。請將產品交回原廠授權的維修中心做進一步的檢查或維修。
7. 外接電源無效或電池電力不足時，紅色低電力的指示燈會亮起，且機器會立即停止運作。請立即更換電力來源避免中斷抽痰流程。

## 故障排除:

### 危險

電擊危險。請勿嘗試打開或拆卸機殼，本器器沒有用戶可維修的內部零件。如果需要維修，請將機器退回授權的維修站。打開或更改機器將使保固失效。

注意 – 本抽痰機不含用戶可以自行維修的零件。如果您認為抽痰機無法正常工作，請在將其退回至出售的經銷商之前，檢查下列可能的原因：

故障問題	處理方式
問題 1: 連接外部電源後機器仍無法開機。 綠色外部電源指示燈未亮起。	<ol style="list-style-type: none"><li>1 檢查電源及其連接。</li><li>2 確認電源插座有電。</li></ol>
問題 2: 內部馬達運轉，但是沒有吸力。	<ol style="list-style-type: none"><li>1 檢查所有管路是否都正確連接。</li><li>2 檢查管路連接有無破裂或滲漏。</li><li>3 確保抽痰瓶中的圓球浮子關閉開關未啟動，過濾器未堵塞。</li><li>4 檢查抽痰瓶有無滲漏或破裂。</li></ol>
問題 3: 吸力過低。	<ol style="list-style-type: none"><li>1 使用抽吸力調整旋鈕調高抽吸力。</li><li>2 檢查系統有無滲漏。</li></ol>
問題 4: 機器無法開機 ( 未連接外部電源)。	<ol style="list-style-type: none"><li>1 檢查電池是否已充滿電並/或為電池充電。</li></ol>
問題 5: 電池無法充電 ( 外部電源和充電指示燈在充電模式應當亮起)。	<ol style="list-style-type: none"><li>1 確認外部電源和充電指示燈都能亮起。</li><li>2 檢查電源及其連接。</li><li>3 確認電源插座有電。</li></ol>